

Favosept® NF

Konzentrat



Desinfektionsmittel für medizinische und rotierende Instrumente

- Alkohol- und aldehydfrei
- Material schonend
- Sehr gute Reinigungseigenschaften
- Ideal für Ultraschallbad
- Biologisch abbaubar
- Nicht korrosiv

Umfangreiches Wirkungsspektrum:

- Bakterizid
- Tuberkulozid
- Levurozid
- Begrenzt viruzid, wirksam gegenüber behüllten Viren, z.B. HBV, HIV, HCV

Anwendungsbereiche:

Favosept® NF Konzentrat ist ein hochwertiges alkoholfreies Instrumentendesinfektionsmittel auf der Basis von quaternären Verbindungen mit hervorragender Reinigungskraft, insbesondere im Ultraschallbad. Das leistungsstarke Produkt wird eingesetzt bei chirurgischen und zahnärztlichen Instrumenten aller Art. Favosept® NF Konzentrat verfügt über kurze Einwirkzeiten - selbst bei hoher Belastung - und bietet eine umfassende Wirkung.

Anwendungshinweise:

Die benutzten Instrumente direkt nach der Verwendung in das Favosept® NF Bad einlegen, damit Verschmutzungen nicht antrocknen. Bei stark verschmutztem Instrumentarium dieses zuvor reinigen. Instrumente müssen von der Gebrauchslösung voll benetzt werden. Nach der Desinfektion Instrumente mit Wasser abspülen und trocknen. Nicht mit Reinigern oder anderen Desinfektionsmitteln mischen. Je nach Verschmutzungsgrad muss die Lösung erneuert werden.

Die Lösung ist auch für das Ultraschallbad geeignet.

Wirkstoffkombination:

In 100g Favosept® NF Konzentrat sind enthalten:
3,3 g Bis (3-aminopropyl)dodecylamin
2,8 g Didecylmethylpolyoxyethylammonium propionat, nichtionische Tenside

Einwirkzeiten:

Bakterien und Candida albicans

| | | |
|------------------|------|--------|
| nach VAH/ DGHM: | 3,0% | 15 Min |
| - hohe Belastung | 2,0% | 30 Min |
| | 1,0% | 60 Min |

Im Ultraschallbad:

| | | |
|--------------------------|------|-------|
| - mit erhöhter Belastung | 3,0% | 5 Min |
|--------------------------|------|-------|

TbB u. Mycobacterium terrae: 3,0% 60 Min

Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV)

| | | |
|----------------|------|--------|
| nach DVV/ RKI: | 3,0% | 15 Min |
| | 1,0% | 60 Min |

| Verpackungseinheit | Art.-Nr. |
|--------------------|----------|
| 1 L Dosierflasche | 163 |
| 5 L Kanister | 164 |

Auf Anfrage teilen wir Ihnen gerne auf Sie zugeschnittene Konditionen mit.

+49 (0) 721 62686-0 • info@favodent.com

CE 0482 N-28100

REF 1638-01 2016-06 DE

Instrumentendesinfektion